

Luier weegschaal

PR C 5010 *II*

gebruiksaanwijzing




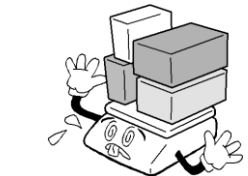









inhoud







VEILIGHEID	-----	4
INLEIDING	-----	6
OMSCHRIJVING EN FUNCTIES	-----	6
GEBRUIK	-----	8
1. WEGEN		8
2. TARREREN		8
3. VERANDEREN EENHEID GEW. (g, kg, lb, oz)		9
4. Hold Functie (Hold versie)		9
5. Hoe Auto Power Off instellen		10
BATTERIJ onderhoud E	-----	11
ERROR meldingen	-----	11
SPECIFICATIES	-----	12

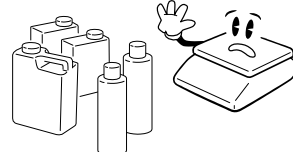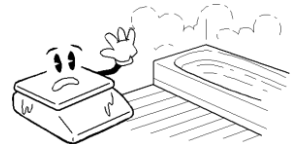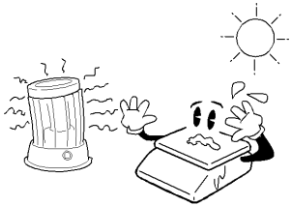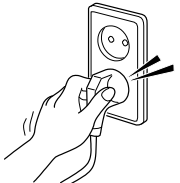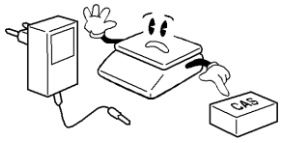Maatregelen voor veilig gebruik

Voorschriften voor het installeren van de weegschaal. **SVP opvolgen om een goede werking te krijgen**

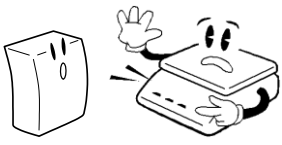!		
<p>Laat onderhoud door gekwalificeerde monteurs uitvoeren.</p> 	<p>Niet over max. gewicht laden !</p> 	<p>Bij gebruik adapter zorg voor goede aarde.</p> 
<p>Verwijder snoer niet door aan de kabel te trekken.</p> 	<p>Voorkom gebruik in de buurt van gassen of licht ontvlambare producten</p> 	<p>Voorkom te vochtige situaties.</p> 
<p>Plaats schaal niet te warm. Niet in de buurt van een verwarming.</p> 	<p>Gebruik de juiste stroom en contactdozen.</p> 	<p>Gebruik de juiste adapter</p> 

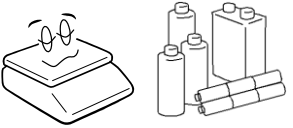Zorg voor de juiste stroomvoorziening. In een koude omgeving eerst een half uur laten opwarmen.


! Attention		
<p>Pleeg regelmatig onderhoud om een goede werking en aflezing te behouden.</p> 	<p>Vermijd schokken en vallen.</p> 	<p>Bij verplaatsen de weegschaal aan de onderkant vast pakken..</p> 
<p>Bij lsn niet gebruiken, debatterijen verwijderen.</p> 	<p>Gebruik de weegschaal in een stabiele tempratuur.</p> 	<p>Vermijd plaatsing in de buurt van electromagnetische apparaten.</p> 

INLEIDING

Dank u voor het aanschaffen van de PR 5010, gemaakt door CAS. Deze fabrikant heeft een de reputatie betrouwbare produkten te maken, en heeft een kwaliteitscontrole systeem om een goede werking van zijn produkten te garanderen


Omschrijving en Functies

OVERALL VIEW

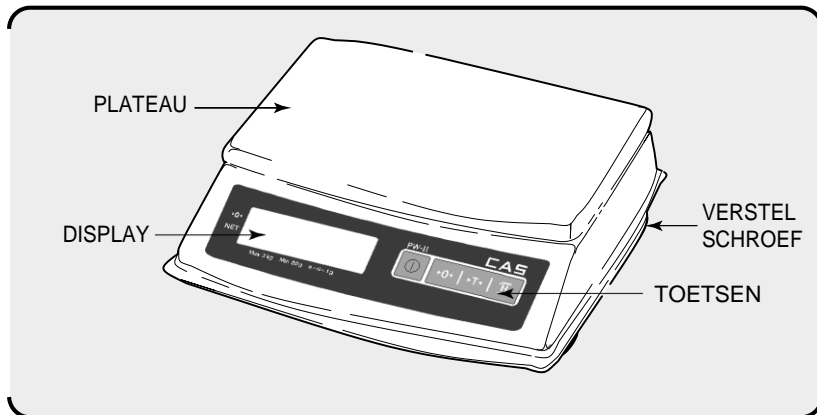

DISPLAY & TOETSEN

■ HOLD versie

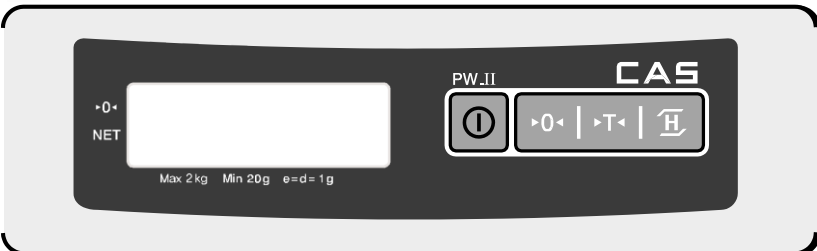

■ FUNCTIES

Toets	FUNCTIES
<0>	Om nul punt in te stellen.
<T>	Om tarra gewicht in te stellen .
H	Als gewicht niet stabiel is zal gemiddeld gewicht na 4 seconden verschijnen.
⊖	Aan / uit zetten.

DISPLAY & KEYBOARD

■ UNIT version




■ KEY FUNCTIONS

KEYS	FUNCTIONS
↔	Used to set the zero point.
↔	Used to enter a tare weight and used to cancel a tare weight.
↔	Used to convert the unit of weight.
↔	Turn on and off the display.

Gebruik



- Zet display aan door te drukken ① toets. De display toont al de segmenten en telt omhoog van "0" tot "9". (druk op de volgende toets **•0•** om te stoppen) Zorg dat er niets op het plateau ligt, bij het opstarten. Anders verschijnt op het display "Err (1)". (Zie ERROR MESSAGE)
- De display toont als de schaal op nul is of als een tara is ingesteld, Doordat een **•0•** verschijnt of **NET** knippert
- Als een gewicht van de luier stabiel is, toont de display **(STABLE)**
- Als de display geen nul toont en er is niets op het plateau, druk dan de **•0•** toets

1. Normaal wegen

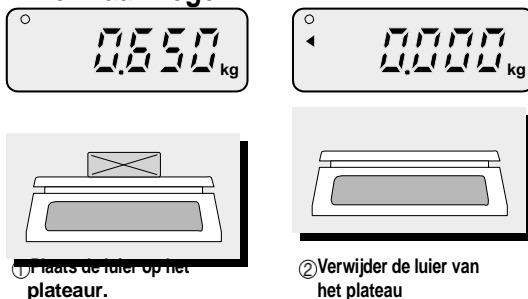

2. Wegen met tara


- Tareer het gewicht van de schaal
- Druk op TARE toets om het gewicht van de schaal op te slaan

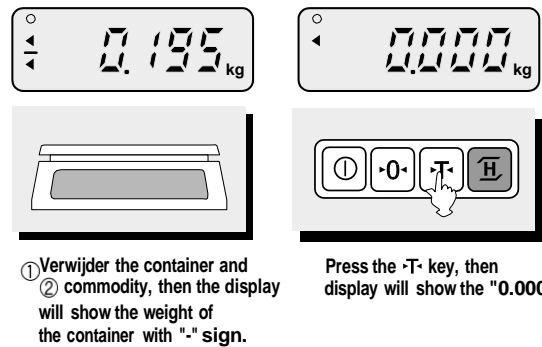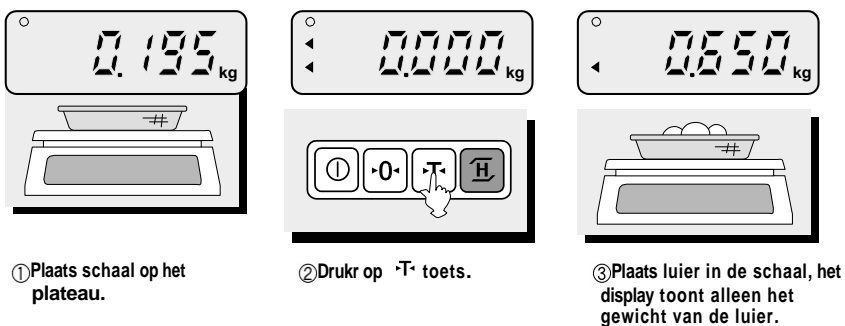

3. Unit versie

- Druk op 'UNIT' toets, Verander naar de eenheid .

4. Hold Functie (Hold versie)

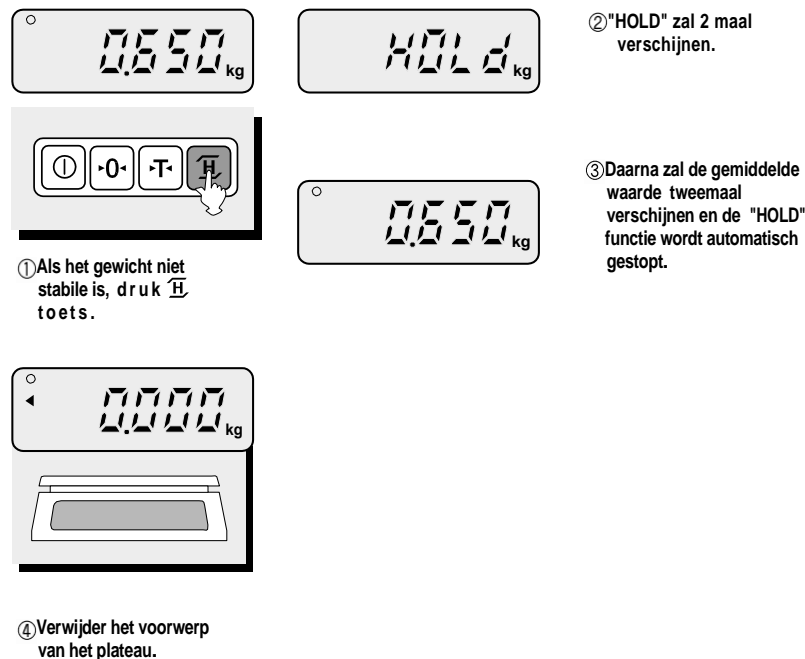


5. Hoe Auto Off in te stellen

Auto-Power off verlengt de batterij levensduur.

Als u geen gebruik maakt van de weegschaal zal de weegschaal automatisch uitschakelen.

Voordat u Auto Power Off instelt, schakel het apparaat uit

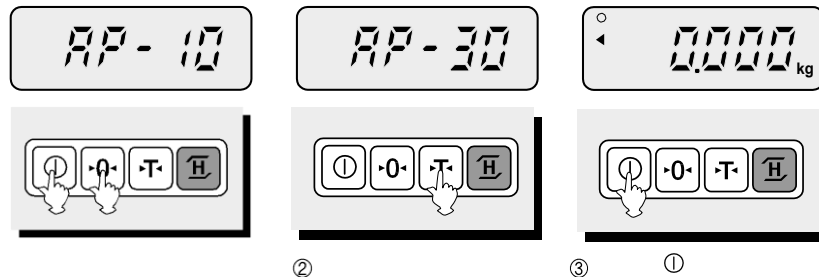

① Druk u op de '0' toets en de '0' toets, u zult dan op de display AP-00. (Als u de instelling al gewijzigd hebt, toont de display een andere waarde.)

② Druk op 'T' toets tot de display "AP-x0" waarde toont die u wilt. (Zie TABEL 1.)

③ Druk op '0' toets. Dan zal de weegschaal de waarde opslaan en bij de start "0" tot "9" aftellen.

TABEL 1.

DISPLAY	FUNCTIE
AP-00	Geen Auto Off ingesteld
AP-10	Weegschaal schakelt na 10 minuten uit.
AP-20	Weegschaal schakelt na 20 minuten uit.
AP-30	Weegschaal schakelt na 30 minuten uit.

► NOTE: Bij auto off instelling moet altijd een functie toets worden ingedrukt alvorens te wegen. Wilt u dit niet dan moet u AP-00 instellen

BATTERIJ onderhoud

Lage spanning waarschuwing

Als de batterij bijna leeg is dan toont de display "BAT" .

Plaats dan nieuwe batterijen.

Indien u dit niet doet kan de weegschaal verkeerde waarde geven..

FOUT MELDINGEN

ERROR	REDEN	OPLOSSING
Err (1)	Initiële nul fout	Verwijder voorwerp en druk op 0
Init	Problemen in Analoge Module	Zet de weegschaal een antal keer aan en uit. Bel dealer als problem blijft
OFL	Te hoog gewicht op plateau	Verwijder voorwerp Let erop dat u niet over de maximale capaciteit gaat.
UNStA	Weegschaal niet stabiel	Zet weegschaal waterpas

MODEL	PW- (2kg)	PW- (5kg)	PW- (10kg)
CAPACITY/e	2kg/0.001kg	5kg/0.002kg	10kg/0.005kg
	5lb/0.002lb	10lb/0.005lb	20lb/0.01lb
	80oz/0.05oz	160oz/0.1oz	400oz/0.2oz
DISPLAY	91 ×39 [mm] / 36" ×14.5" 5 digits LCD		
MAX TARE	FULL TARE		
TEMPERATURE RANGE	-10°C ~ +40°C / 14 °F ~ 104 °F		
POWER SUPPLY	1.5V ×6 (AA size Battery)		
POWER CONSUMPTION	APPROX. 0.25W		
BATTERY OPERATING TIME	150 hours (Manganese battery)		
	400 hours (Alkaline battery)		
PLATTER SIZE	222(W) ×151(D) [mm] / 87.40(W) ×59.40(D) [inch]		
DIMENSIONS	239(W)×227(D)×66(H) [mm] / 94(W)×89(D)×26(H) [inch]		
PRODUCT WEIGHT	1.5kg / 3.3lb		
OPERATING POWER	9V Adaptor 300mA		

► Notice: Specifications are subject to change for improvement without notice.



Prior
Medical Systems
Unified weighing solutions

Voor hulp email : info@prior-medical.com

