



Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie.

Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie.

Functietoetsen:

POWER

SET

CLEAR

0 – 9

0 (item)

1 (zero)

2 (G/N)

3 (tare)

4 (i*sum)

5 (g*sum)

6 (w*cnt)

7 (print)

8 (hold)

9 (b*chk)

4 (i*sum) +7 (print)

5 (g*sum)+7 (print)

Set + 3 (tare)

F1 / F2

Omschrijving:

- Aan / uit toets van de weegschaal
- Voor het opslaan van de huidige status en het verlaten van de SET mode
- Voor het corrigeren van een verkeerde ingegeven waarde
- Voor het invoeren van een decimaal punt (.) in de setup en weegmode
- De numerieke toetsen, te gebruiken o.a. bij de invoermode
- Gebruik het voor het registreren van een item nummer (0~19)
- Voor het nulstellen van de weegschaal
- Lang ingedrukt houden om in de test mode te komen
- Bruto en netto gewicht
- Lang ingedrukt houden om in de set-up mode te komen
- Gebruik het om te wegen met een tarra
- Sla het huidige gewicht met tarra op in het geheugen
- Voor het verwijderen van de tarra indien het plateau leeg is
- Voor het controleren van het subtotaal
- Voor het controleren van het totaal
- Voor het controleren van het aantal wegingen
- Om te printen indien er een printer is aangesloten
- Voor het eind of gemiddeld gewicht vast te houden
- Voor het controleren van de batterij capaciteit
- Voor het uitprinten van het subtotaal
- Voor het uitprinten van het totaal
- Voor het invoeren van een bekende tarra, met de numerieke toetsen
- Voorkeuze toetsen

Werking weegschaal:

Stap 1:

Druk op de **POWER** toets.

Stap 2:

Laat de patiënt op de stoel zitten .

Stap 3:

Lees het gewicht af van het display.

Stap 4:

Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **POWER** toets te drukken.

Tareren met de TARE toets:

Stap 1:

Plaats het voorwerp op het weegstoel.

Stap 2:

Het gewicht van het voorwerp wordt weergegeven in het display.

Druk eenmaal op de **3 (TARE)** toets.

Het gewicht van het voorwerp is nu getarreed.

Het display van de weegschaal zal nu naar nul gaan.

Stap 3:

Laat de patiënt op de stoel zitten totdat het gewenste **netto gewicht** getoond wordt.

Indien u op de **2 (G/N)** toets (NET/GROSS toets) drukt dan krijgt u het bruto gewicht.

(bruto gewicht = Tarra + netto gewicht)

Door nogmaals op de **2 (G/N)** toets te drukken krijgt u weer het netto gewicht.

Stap 4:

Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de **3 (TARE)** toets.

Werken met de HOLD toets:

Deze functie schakelt automatisch aan. Na 5 seconden brandt het hold lampje.

Stap 1: Plaats een patient op de stoel.

Stap 2: Hold zal na 5 seconden zichtbaar zijn in het display.

De weegschaal is nu het gemiddelde gewicht aan het berekenen en zal dit binnen 3-5 seconde aangeven in het display, **Druk op HOLD** en de display zal 20 seconden het gewicht tonen. Wilt u hold stoppen, druk dan op ZERO

HOLD Functie instellen

Om in de **set** mode te komen, het toestel aan zetten , daarna de **G/N** toets ongeveer twee seconden in gedrukt houden. Vervolgens gaat men naar **F10** door 10 in te toetsen en op **set** te drukken. Men kan nu voor **F10** een waarde invoeren , toets 4 in en druk op **set** Zet het toestel uit en aan

Invoeren van een item nummer (ID)

Stap 1: Druk op de **0 (item)** toets. In het display verschijnt ID = XX

Stap 2: Voer een gewenst ID nummer in met de numerieke toetsen (tussen 0~19)

Stap 3: Druk op de **SET** toets om dit op te slaan en het menu te verlaten

Bekende tarra opslaan

Stap 1: Druk op de **SET + 3 (TARE)** toetsen. In het display verschijnt t = 0.000

Stap 2: Voer een gewenst ID nummer in met de numerieke toetsen

Stap 3: Druk op de **SET** toets om dit op te slaan en het menu te verlaten

Om de Set mode te verlaten houdt u de **SET** toets ingedrukt.

SET functies:

F01 Wijzigen van de datum

F02 Wijzigen van de tijd

F03 (00) Auto Power off

F17 (00) Instellen F1 toets

F18 (00) Instellen F2 toets

Check functies:

F51 (00) Buzzer aan/uit

Zie voor verdere SET functies de Engelstalige handleiding

Auto Power off setting:

De weegschaal is voorzien van een batterij besparende functie.

Indien deze functie is ingeschakeld zal de weegschaal zichzelf na 10 of 30 minuten uitschakelen, zodra de weegschaal gedurende deze periode niet wordt gebruikt.

Activeren van deze functie:

Stap 1: Houd gedurende 3 seconde de **2 (G/N)** toets ingedrukt

Stap 2: Ga naar functie F03

Stap 3: Voer met de numerieke toetsen de gewenste tijd (10 of 30 voor het aantal minuten)

Stap 4: Druk op de **SET** toets om dit op te slaan en het menu te verlaten

Foutmeldingen:

Err 01	Platform is niet stabiel waardoor de weegschaal niet op nul komt Zet de weegschaal op een stabiele ondergrond en zet de weegschaal aan.
Err 02	Bel uw leverancier voor service
Err 05	Bel uw leverancier voor service
Err 08	Bel uw leverancier voor service
Err 09	Het gewicht wat op het plateau aanwezig is kan niet op nul gesteld worden.
Err 10	Tarra gewicht is groter dan het maximale weegvermogen Zorg altijd dat de tarra kleiner is dan het maximale weegvermogen.
Err 12	Bel uw leverancier voor service
Err 13	Er staat meer gewicht op het plateau dan 10% van het max. weegvermogen tijdens het opstarten. Maak het plateau leeg.
Err 15	Bel uw leverancier voor service
OVER	Weegschaal is belast met meer dan het toegestane maximale weegvermogen Verwijder het gewicht van de weegschaal en pas dit aan.

Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.