

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



SBP 3100 KLASSE III ELECTRONISCHE MEDISCHE WEEGSCHAAL

Lees voordat u het produkt gaat gebruiken

Deze elektronische medische weegschaal is ontworpen en gemaakt volgens de volgende normeringen : ISO 9001 Quality, ISO14001 Environment, OHSAS18001 Health and Safety and ISO13485 Medical Devices Quality.

Gebruik

De elektronische weegschaal is voor het wegen van personen met als doel controle, diagnose en ondersteuning bij medische behandelingen.

Beschrijving van het product :

- Precisieklasse III (volgens EG richtlijn 90/384 EEC)
- Weegfunctie
- Waterpas en verstelbare voetjes
- Aan knop (met de voet) en auto uit functie.
- Batterij laag indicatie.
- Capaciteit: 180 kg.
- Indeling: 100 g.
- Werkt op 1 9V batterij (6LR61 of gelijkwaardig) of met een AC 100-240V adaptor input/DC 9V output

Kwaliteitswaarborg



51480360

K.v.K. Den Haag

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



PRODUCT Gebruik

Eerste gebruik

- Plaats de batterij (en) in het batterij houder, let erop dat + /- op de goede plaats zitten. In batterijhouder wordt aangegeven welke batterij te gebruiken.
- De weegschaal dient waterpas geplaatst te zijn alvorens te wegen:
 1. ga niet op de weegschaal staan, en zorg dat er geen gewicht op de schaal staat.
 2. plaats de weegschaal op een hard, vlak oppervlak. Gebruik de verstelbare voetjes om de schaal waterpas te stellen. De luchtbel moet in het midden van de getekende cirkel zijn.

Boven aanzicht

LCD display
Waterpas
Platform
Cirkel
Luchtbel
Aan knop

Achterkant

Batterij
Batterij compartiment
DC adaptor input
Verstelbare voetjes

Gebruik

1. Druk op de aan knop of tik met de voet tegen de voorkant. De volgende getallen verschijnen automatisch achter elkaar :
Software versie, alle getallen, "0,0"
2. Zodra de weegschaal op "0,0" staat, stap u op de schaal. Na enkele seconden verschijnt uw gewicht.
3. Na 10 seconden schakelt de weegschaal automatisch uit.

Fout meldingen :

Err0 Initiele nul fout. Stap van de schaal af, wacht tot het "0,0" verschijnt en stap weer op de schaal.

adErr Hardware probleem, neem contact op met uw technische dienst of de leverancier.

Kwaliteitswaarborg



51480360

K.v.K. Den Haag

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Err2 Gewicht boven max. capaciteit. Stap er onmiddellijk af of verwijder gewicht.
EEP Hardware probleem, neem contact op met uw technische dienst of de leverancier.
bAt Batterij leeg of laag, vervang batterij .
Ustb instabiele nul, wacht tot de weegschaal "0,0" toont en stap dan op de schaal.

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd tegen materiaal – en produktiefouten. Tijdens de garantieperiode, zullen defecten ontstaan door materiaale- en produktiefouten kosteloos gerepareerd worden (factuurdatum en serienummer dienen bekend te zijn). De garantie dekt niet schade ontstaan door ondeskundig gebruik. Alle beweeglijke delen , zoals batterijen , adapters etc, zijn uitgesloten.

AFTER SALES SERVICE

Voor kalibratie, ijking en storingsen , neemt u svp contact op met 071-4030101 of e-mail info@prior-medical.com .

Kwaliteitswaarborg



51480360

K.v.K. Den Haag