



Prior Medical Systems

Gebruiksaanwijzing

P BW-0365 BABYWEEGSCHAAL





Prior Medical Systems

1. Gebruiksaanwijzing

Voeding

Voeding: AC230V/6V 0.3mA



Omgeving:

Temperatuurgrens: -10°C ~ 40°C

Belangrijk

1. Vermijdt snelle temperatuurwisselingen, wind, direct zonlicht of watercontact.
2. Sluit de weegschaal aan op een geaard stopcontact.
3. Houdt de loadcellen en de loadcellkabel vrij van vocht.


Backlight instellen

1. Backlight uit: Houdt  3 seconden in tot de display "OFF" weergeeft.
2. Auto backlight aan: Houdt  3 seconden in tot de display "ON" weergeeft. De backlight zal aangaan als er een last op de weegschaal ligt.



Prior Medical Systems

2.Toetsenbord/display

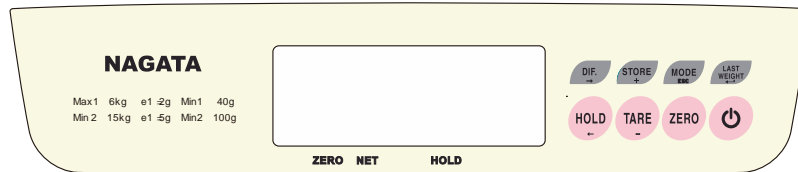

3.Functies toetsenbord




Druk om de weegschaal aan en uit te zetten.

- Aanzetten: Kort drukken.
- Uitzetten: Houdt 2 seconden in tot de display OFF weergeeft.




Als de weegschaal op 0 staat kunt u de "HOLD" knop inhouden om de Auto of Manuele Hold modus in te stellen.

- Auto Hold modus:
De weegschaal houdt de waarde vast zodra deze stabiel is.
- Manuele Hold modus:
Zodra de weegschaal stabiel is kan op "HOLD" gedrukt worden om de waarde vast te zetten.
- Om de volgende waarde vast te zetten:

Als de waarde stabiel en vastgezet is, druk nogmaals op  om de waarde los te laten en de volgende waarde vast te zetten.



TARE functie






- Plaats de lege bak of de deken op de weegschaal en druk op  om het gewicht van het item af te trekken. Als u het item van de weegschaal haalt zal deze een negatieve waarde laten zien.

- Druk op  of  om de instelling te annuleren.




Prior Medical Systems

Pre-tare functie

- a. Pre-tare functie (Houdt  3 seconden ingedrukt)
Houdt deze knop 3 seconden ingedrukt als de weegschaal op 0 staat. Vul vervolgens het gewenst gewicht in en druk op . De display laat vervolgens de gewenste negatieve waarde zien. Druk op  of  om de instelling te annuleren.
- b. Terwijl de last op de weegschaal ligt, druk op  om het pre-tare gewicht voor 3 seconden te laten zien.

ZERO

- a. Druk hierop om de 0-waarde bij te stellen (<+/-2%).
- b. Zet de weegschaal aan en druk op  om de software versie te zien.
Laat de knop weer los om terug naar weegmodus te gaan.

MODE ESC

- a. Druk op deze knop als de weegschaal op 0 staat om de multi-range modus in te stellen |1| |2| auto
- c. Houdt deze knop ingedrukt als de weegschaal op 0 staat om te wisselen tussen Kg en Lbs.

STORE +

Bewaar de meting (kort drukken)

Plaats de baby op het platform en de weegschaal zal het gewicht opslaan zodra het stabiel is. Houdt de knop 3 seconden ingedrukt tot





verschijnt. Gebruik vervolgens   om te bepalen

in welke positie de waarde wordt opgeslagen (1-99). Druk op




om (1) of (2) te selecteren:

- (1) Druk op  om terug te gaan naar weegmodus of wacht 10 seconden.
- (2) Gebruik  om een opslagpositie leeg te maken. Als de positie gewist is






Prior Medical Systems

laat de display de volgende positie zien. Druk op  om deze functie te verlaten.



 DIF.
→


Gewichtsverschil

Plaats de baby op het platform en de schaal houdt de waarde vast zodra deze stabiel is. Druk op "DIF." en de schaal zal  laten zien en gebruik

opnieuw  om de opslagpositie te bepalen (1-99). Druk op  om de andere waarde te laten zien. Als de baby verwijderd wordt zal de weegschaal terug gaan naar weegmodus.

DIF. terugroepen:

Druk op  en de display laat  zien en gebruik   om

gewenste positie te selecteren (1-99), en druk op  om de DIF. Value weer te geven. De weegschaal gaat terug naar weegmodus in 3 seconden.




 LAST
WEIGHT
←

Druk op deze knop als de weegschaal op 0 staat om de laatste meting weer te geven.



Prior Medical Systems

Certificering :

	info@prior-medical.com
	NAGATA SCALE CO.,LTD No.3, Lane 404, Chung Cheng S. RD., Young Kang Dist., Tainan City, Taiwan
	Dit symbool betekent "Lees gebruiksaanwijzing"
	Dit symbool betekent Attentie! Lees documentatie.
	Dit symbool betekent : elektrische beveiliging Type B equipment.
	Het product voldoet aan de volgende richtlijnen / eisen: Directive 93/42/EEC
	Dit symbool betekent, niet met gewoon afval afvoeren, maar via milieu plein.
	Dit symbool betekent, weegschaal is medisch hulpmiddel volgens EC richtlijnen
	Weegschaal valt in Klasse III , EC Directive 90/384/EEC
	Het product voldoet aan de volgende richtlijnen: 1.Richtlijn 90/384/EEC 2.DIN EN 45501 NAWI

GARANTIE

2 jaar op fabricage en montage fouten, en gebreken veroorzaakt door niet goed functionerende onderdelen. Onkundig en fout gebruik en slijtage vallen buiten de garantie.



Prior Medical Systems

Alleen voor bevoegde personen !

BW 0365 instellingen

De procedure is :

Houdt de knop LAST WEIGHT vast en kort op aan/uitknop tot 4 verschijnt, druk op ZERO tot 5 verschijnt, druk weer op LAST WEIGHT tot 6 verschijnt, druk op ZERO om tot 456 verschijnt, en FnC verschijnt.

Druk op LAST WEIGHT tot F03 verschijnt, gebruik STORE + en TARE – om tussen functies te wisselen

Geluid

F3 : 0 geen geluid. 1 piep geluid

Aanraak geluid toetsen :

F4 : 0 geen geluid. 1 piep geluid

Energiebesparing :

F10 : 0 niet actief 1 actief

Backlight selectie :

F11 : 0 niet actief 1 actief

Auto off backlight :

F12 : 00 niet actief

01-99 seconden

Autohold

F13 : 0 handmatig. 1 automatisch

Autohold gewicht gevoeligheid

F14 : stel op 1.000 in

Tijd dat gewicht op display blijft :

F15 : 00 niet actief wel – 1-98 seconden

99 altijd



Prior Medical Systems

Auto off :F 17

De weegschaal staat ingesteld op F17 30 (300 sec) 5minuten auto off. Met STORE en TARE kan de instelling gewijzigd worden