



Toets	FUNCTIES
<0>	Om nul punt in te stellen.
<T>	Om tarra gewicht in te stellen .
H	Als gewicht niet stabiel is zal gemiddeld gewicht na 4 seconden verschijnen.
⊖	Aan / uit zetten.

Gebruik

Zet display aan door op \emptyset toets te drukken. De display telt omhoog van "0" tot "9". (druk op >0< om te stoppen.) Zorg dat er niets op het plateau ligt bij het opstarten. Anders verschijnt op het display "Err(1)". (zie foutmeldingen).

De display knippert links naast >0< of NET. Indien NET knippert, is er een tarra ingesteld.

Als het gewicht stabiel is toont de display (STABLE).

Als de display geen nul toont en er ligt niets op plateau, druk dan op de >0< toets.

FOUT MELDINGEN

ERROR	REDEN	OPLOSSING
Err (1)	Initiële nul fout	Verwijder voorwerp en druk op 0
Init	Problemen in Analoge Module	Zet de weegschaal een aantal keer aan en uit. Bel dealer als probleem blijft
OFL	Te hoog gewicht op plateau	Verwijder voorwerp Let erop dat u niet over de maximale capaciteit gaat.
UNStA	Weegschaal niet stabiel	Zet weegschaal waterpas